



Nouveau !



Vous trouverez dans ce colis les nouveaux modèles de boucles d'identification des veaux que notre Conseil d'Administration a décidé de généraliser à tous les troupeaux wallons (**au même tarif que l'identification traditionnelle !**): une **BOUCLE À PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE** + une **BOUCLE ÉLECTRONIQUE**.

Cette décision répond aux nouvelles évolutions de traçabilité et de santé, d'une part dans le cadre de la certification des productions animales BIO, et d'autre part en application des nouvelles législations européennes qui tiennent compte de l'évolution technologique des filières animales. Elle permet aussi de garantir le prix le plus bas possible, en simplifiant la distribution d'un seul type de matériel d'identification.

La paire de marques auriculaires à apposer dans les 7 jours de la naissance doit idéalement être bouclée selon la séquence suivante :

1 Oreille droite

Le couple M-F à **poser à l'oreille droite** (en regardant le veau par derrière, ou par rapport à la marche en avant), dont la plaquette F a un bouton blanc: cette boucle permet le prélèvement d'un confetti d'oreille, utilisé officiellement depuis 2014 dans le programme BVD de dépistage précoce des veaux IPI.



Le **petit tube numéroté**, qui sert à transporter l'échantillon, contient maintenant un liquide (250µl),



L'ADN extrait dans le liquide sera stocké sur un buvard et pourra être utilisé notamment pour garantir la traçabilité en filière BIO, au même titre que ce qui se faisait depuis 20 ans avec la pilothèque. Le prélèvement « pilothèque » sur base volontaire sera donc remplacé par cet échantillon multi-usages.

qui améliore la conservation de l'échantillon, facilite une analyse en mélange et permet de répondre en même temps à l'analyse ADN qui sert notamment aux certificateurs de la filière BIO.

2 Oreille gauche

Le couple M-F à **poser à l'oreille gauche**, dont la plaquette F possède une tête plus large avec un bouton noir, et la plaquette M est plus courte:



La tête de la plaquette F contient une **puce électronique**, reprenant le **N° officiel** inscrit sur les 2 plaquettes.

Cette **boucle électronique ISO** est utilisable avec des lecteurs portables ou fixes, compatibles avec de nombreux systèmes de gestion des animaux (comptage, tri, surveillance à distance, alimentation des veaux, distributeur de concentré, robot de traite, contrôle laitier, pesée automatique, marché, abattoir,...).

La législation européenne prévoit qu'à partir de juillet 2019, les différents intermédiaires de la filière bovine doivent pouvoir être équipés pour utiliser cette technologie de l'identification électronique.

Attention !

Le conditionnement des boucles a également été adapté: chaque boîte cartonnée contient 4 barrettes de 4 numéros, permettant d'identifier 16 veaux.



Mode d'emploi

Marque auriculaire électronique (ALLFLEX SELECT ULTRA)

La **PLAQUETTE FEMELLE** se caractérise par l'intégration en sa partie supérieure d'une tête rigide contenant le transpondeur électronique.



La **PLAQUETTE MÂLE** de format Junior (dimensions réduites) ne comporte pas de code-barres.

Avantages du format Junior :

- diminution du risque d'accrochage ;
- facilité de distinguer à l'oeil une boucle électronique d'une boucle classique.

L'apposition de la marque auriculaire électronique SELECT ULTRA s'effectue soit avec la pince **TOTAL TAGGER UNIVERSELLE rouge**, soit avec la pince **TTU-BVD jaune** (moyennant l'installation du pointeau universel dans le logement prévu à cet effet)


1

Enlever l'adaptateur
(pièce plastique sous la pédale)



2

Insérer la partie femelle sous la pédale

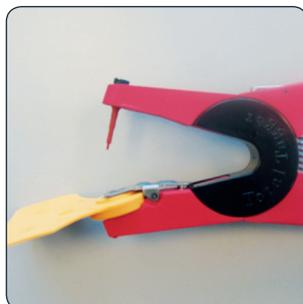

3

Glisser la partie mâle sur le pointeau



4

Tester l'approche du pointeau vers la partie femelle



1. Avant apposition, tremper la boucle dans une solution antiseptique. Cela aide à la mise en place et à la cicatrisation ;
2. Après la pose, surveiller la cicatrisation et désinfecter si nécessaire.

5

Positionner la boucle à l'oreille gauche entre 2 nervures à un tiers de distance de la tête :

- La partie femelle électronique doit être placée à l'intérieur de l'oreille ;
- la partie mâle doit toujours pénétrer par l'arrière de l'oreille ;
- la plaquette mâle de format « junior » est donc facilement lisible derrière l'oreille.

6

A la bonne position, appliquer fermement la marque auriculaire



Une question ?

Tel : 083 23 05 15
E-mail : arsia@arsia.be