


Neu!



In diesem Paket finden Sie die neuen Modelle von Ohrmarken zur Identifizierung der Kälber, für die unser Verwaltungsrat die allgemeine Benutzung in allen wallonischen Beständen beschlossen hat (zum selben Tarif, wie die traditionelle Identifizierung!): eine **OHRMARKE MIT BIOLOGISCHER PROBENENTNAHME** + EINE **ELEKTRONISCHE OHRMARKE**.

Diese Entscheidung entspricht den neuesten Entwicklungen in Sachen Rückverfolgbarkeit und Gesundheit, dies, einerseits im Rahmen der Zertifizierung der tierischen BIO Erzeugungen und andererseits in Anwendung der neuen europäischen Gesetzgebungen, welche die technische Entwicklung der Tierindustrien berücksichtigen. Sie gewährleistet ebenfalls den geringstmöglichen Preis, durch die einfache Verteilung einer einzigen Art von Identifizierungsmaterial.

Das Ohrmarkenpaar, welches innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt eingezogen werden muss, erfolgt am besten auf folgende Art und Weise:

1 Rechtes Ohr

Das Paar Dornteil-Lochteil - **am rechten Ohr einzuziehen**

- (wenn sie das Kalb von hinten betrachten, oder im Vergleich zum Vorwärtsgang), die Kappe des Lochteils hat einen weissen Knopf: diese Ohrmarke ermöglicht die Entnahme einer Ohrgewebeprobe, die seit 2014 offiziell benutzt wird, im Rahmen des BVD Programms zum vorzei-



tigen Nachweis der IPI-Kälber.

Das **kleine nummerierte Röhrchen**, das für den Transport der Probe vorgesehen



ist, enthält jetzt eine Flüssigkeit (250µl), welche die Konservierung der Probe verbessert, die Analyse in Mischung erleichtert und zeitgleich eine DNA-Analyse ermöglicht, die vor allem den Zertifizierern der BIO-Industrie dient.

Die aus der Flüssigkeit entfernte DNA wird auf Filterpapier gelagert und kann insbesondere zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit in der BIO-Kette benutzt werden, so wie es seit fast 20 Jahren die Haarbank tat. Die freiwillige Probenentnahme « Haarbank » wird somit durch diese Mehrzweckprobe ersetzt.

2 Linkes Ohr

Das Paar Dornteil-Lochteil - **am linken Ohr einzuziehen**

-, dessen Kappe einen größeren Kopf besitzt mit einem schwarzen Knopf und der Dornteil ist kürzer:

Der Kopf des Lochteils enthält einen **elektronischen Chip**, die **offizielle Nr.** ist auf den 2 Teilen vermerkt.



Diese **elektronische ISO Ohrmarke** kann mit tragbaren oder fixen Lesegeräten benutzt werden und ist kompatibel mit zahlreichen Tiermanagementsystemen (Zählung, Sortieren, Fernüberwachung, Ernährung der Kälber, Konzentrationspender, Melkroboter, Milchkontrolle, automatisches Wiegen, Markt, Schlachthof,...).

Die europäische Gesetzgebung sieht vor, dass, ab Juli 2019, die verschiedenen Zwischenpersonen der Rinderindustrie so ausgestattet sein müssen, dass diese Technologie der elektronischen Identifizierung eingesetzt werden kann.

Achtung!

Die Verpackung der Ohrmarken wurde ebenfalls angepasst: jede Pappschachtel enthält 4 Halterstreifen mit 4 Nummern, zur Identifizierung von 16 Kälbern.



Anleitung

Elektronische Ohrmarke (ALLFLEX SELECT ULTRA)

Die **LOCHTEIL-PLATTE** enthält im oberen Teil einen starren Kopf, der den elektronischen Transponder beinhaltet.



Die **DORNTAIL-PLATTE** des Formats Junior (kleinere Abmessungen) enthält keinen Strichcode.

Vorteile des Formats Junior :

- vermindertes Risiko des Hängenbleibens ;
- Unterscheidung mit bloßem Auge zwischen einer elektronischen und einer klassischen Ohrmarke.

Das Einziehen der elektronischen Ohrmarke **SELECT ULTRA** erfolgt entweder mit der Zange **TOTAL TAGGER UNIVERSaL rot**, oder mit der Zange **TTU-BVD gelb** (mittels Einfügen des Universalstifts an der dafür vorgesehenen Stelle)


1

Den Adapter entfernen
(Plastikteil unter der Klappe)



2

Fügen sie das Lochteil unter die Klappe ein

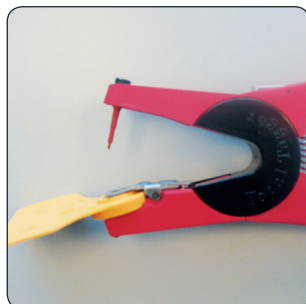

3

Stecken sie den Dornteil auf den Stift



4

Testen Sie das Annähern des Stifts an den Lochteil

5

Bringen Sie die Ohrmarke am linken Ohr zwischen 2 Knorpelleisten mit zwei Drittel Abstand zum Kopf an:

- der Lochteil gehört in das Innere des Ohres;
- der Dornteil muss das Ohr immer von hinten durchdringen;
- die Dornteil-Platte des Formats « Junior » ist daher leicht lesbar hinter dem Ohr.

6

Ist die gute Position erreicht, die Ohrmarke kräftig schliessen



1. Tauchen Sie die Ohrmarke vor dem Einziehen in eine antiseptische Lösung. Dies hilft beim Anbringen und bei der Wundheilung;
2. Überprüfen Sie nach dem Einziehen die Wundheilung und desinfizieren Sie die Wunde, falls nötig.



Eine Frage?

Tel : 083 23 05 15
E-mail : arsia@arsia.be